

BLIMO CADDIE GOLFSCOOTER BRUGSANVISNING



BLIMO
HJÄLPMEDEL

INDHOLDSFORTEGNELSE

Oversigt over køretøj	1
Montering	2-3
Batterier og opladning	4
Kørsel af din Blimo	5
Vedligeholdelse	6-7
Teknisk information.....	8
Fejlfinding	9
Kontaktoplysninger	10

OVERSIGT OVER KØRETØJ



MONTERING

Når din Blimo leveres er størstedelen monteret. Det er en fordel at folde og gemme emballagen som køretøjet bliver leveret i til hvis du i fremtiden skal sende den retur. Papkassen er også en god beskyttelse ved langtidsopbevaring.

Tjek ved leveringen at følgende dele er med:

1. Bagerste del
2. Forreste del
3. Sæde samt bundplade
4. Brugsanvisning
5. Værktøjskit
6. Oplader
7. Kurv foran
8. Golf taskeholder
9. To batteritasker med batterier og kabler



MONTERING AF BLIMO CADDIE

Din scooter har to hoveddele, forreste- og bagerste del. Du kan også løsne stolen og fjerne batterier så det er nemt at løfte din Golf scooter ind og ud af f.eks. din bil.

TILSLUTNING AF FORRESTE- OG BAGERSTE DEL

For at tilkoble forreste- og bagerste del, skal du tilslutte scooterens to kabler. Hvordan de to kabler ser ud, illustreres til højre.


Ved tilslutningen findes du også promenadescooterens sprint. Tilslut denne for at forsegle forreste- og bagerste del.

TILSLUT BATTERIERNE

Ved leveringen har du modtaget to stk. batterier. Placer disse i hver sin batteritaske. Tilslut derefter batterikablerne på hver sin pol (rød på rød, sort på sort) og træk kablerne igennem hullet på din batteritaske. På den bagerste del på din Blimo Caddie er der plads til batterierne. Placer et batteri på hver side af den bagerste del og tilslut batterikablerne til hovedkablet.

OPLAD BATTERIERNE

Oplad altid batterierne inden du bruger din Golf scooter første gang. Ved første opladning skal de oplades i 12 timer. Du kan læse mere om hvordan du oplader dem samt hvordan de beskyttes på side 4.

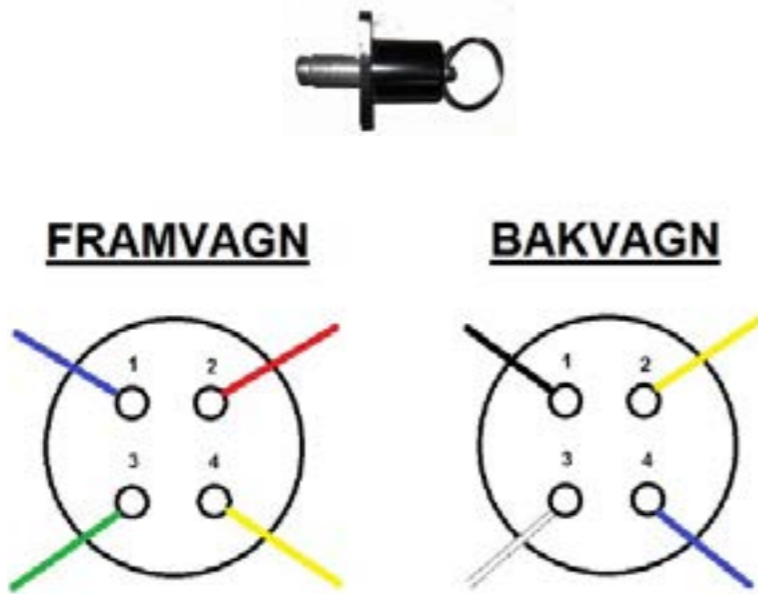

MONTERING

INSTILLING AF STYRET

På styrestangen på din Blimo Caddie er der et rundt rat til justering. Løsne på denne for at trække styret tættere på eller længere fra dig. Spænd derefter rattet når du har valgt den rette position.

Du kan også vælge at folde styret helt sammen og derefter stramme rattet. Det gør det nemmere når du skal transportere dit køretøj.

INDSTILLING AF SÆDE

Når du får din Blimo Golf Scooter, er sædet i to dele. Først har du selve sædedelen, og så har du også bundpladen i sædet. Et tip er først at fastgøre bundpladen til sadelpinden og derefter fastgøre sædedelen til bundpladen.

For at sætte sædet fast i sadelpinden bruges en gennemgående bolt. Bemærk at du kan fæstne dit sæde i tre forskellige højder ved hjælp af denne bolt. Vi anbefaler den midterste højde til at begynde med.

Hvis du holder den orangefarvet håndtag inde kan du nemt fjerne dit sæde. Hvis du skal sætte sædet på, holder du håndtaget inde, sætter stolen på plads og slipper det. Ryk lidt på stolen indtil den klikker på plads. Med dette håndtag kan du også skubbe stolen frem og tilbage.

TILBEHØR TIL BLIMO

På sædets bagside finder du golf taskeholderen. Du kan også tilkøbe en golf taske til din promenadescooter for nemt at have alt tilbehør med på golfgrunden. Du har til dels en golf taskeholder fornedet på din Blimo samt en ekstra holder længere oppe bagpå sædet for at det er mere robust.

Du kan også tilkøbe anden tilbehør til din Blimo Caddie. På Blimo.dk kan du se det forskellige tilbehør som kan købes til din særlige promenadescooter.



BATTERIER OG OPLADER

Din Blimo drives af 2 stk. seriekoblet blyakkumulatorer på 12V. Batterierne er helt forseglede og behøver således ingen vedligeholdelse (Du behøver ikke at fylde batterivæske på dem). Batterierne bliver slidt fra første anvendelse, og mister derved rækkevidde over tid. Normal livslængde på et batteri er fra 6 måneder og op til 3-4 år afhængig af hvordan de anvendes. Normalt udskiftes et batteri inden det er helt dødt på grund af at den maksimale rækkevidde forringes over tid.

Bemærk også at rækkevidden forringes betydeligt når temperaturen daler. Hvis temperaturen på batterierne daler til f.eks. 20 °C til 5 °C bliver rækkevidden næsten halveret. Vi fraråder anvendelse når det er koldere end -5 °C.

Når det er tid til at udskifte dine batterier er det vigtigt at du anskaffer den rigtige model. Kontakt Blimo Hjælpemiddel for at få de rigtige batterier!

Det er vigtigt at huske på at batterierne skal beskyttes på den rigtige måde for at undgå unormal hurtig slitage eller påføre skade på dem.

Hvis du ikke ønsker at bruge din Blimo i en længere periode, så skal batterierne oplades med 30 dages mellemrum. Ved vinteropbevaring skal batterierne opbevares i plusgrader.

VEJLEDNING FOR BATTERIER

- 1) Oplad batterierne i mindst 12 timer inden du bruger dem første gang.
- 2) Oplad aldrig batterierne i mere end 24 timer i træk.
- 3) Aflad aldrig batterierne, hvis batterierne aflades kan de tage skade eller gå i stykker.
- 4) Oplad altid køretøjet når batterikapaciteten er under 20%.
- 5) Oplad batterierne efter hver køretur.
- 6) Opbevar aldrig batterierne i minusgrader uden at de er fuldt opladet.
- 7) Overophed aldrig batterierne, undgå f.eks. at have dem direkte i sollys.
- 8) Vedligehold batterierne ved langtidsopbevaring.

OPLADER OG OPLADNING

Opladeren til din Blimo oplader begge batterier samtidig og slår over til vedligeholdelsesopladning når batterierne er fuldt opladet. Vi anbefaler dog ikke at opladeren sidder i længere end 24 timer ved hver opladning. Køretøjet skal altid være slukket når det oplades. Sørg for at opladningen foregår i et tørt miljø samt i plusgrader. Opladeren kan tage skade hvis den udsættes for fugt!

For at oplade skal du:

- 1) Tilslutte opladeren til en jordstikkontakt.
- 2) Tilslutte opladerens mundstykke til opladeindgangen på din Blimo (Se oversigtsbillede).
- 3) Tænd for opladeren med dets eget strømafbryder.

På opladeren er der to dioder som viser opladestatus. Når køretøjet oplades, skal den ene diode lyse RØD og den anden ORANGE. Når batterierne er fuldt opladet, skal dioderne lyse RØD og GRØN. Hvis den grønne diode skifter fra ORANGE/GRØN så er opladeren overgået til vedligeholdelsesopladning. Batterierne bliver solgt fuldt opladet.

Ved siden af dioderne er der en sikringsholder afmærket "FUSE". Hvis opladeren holder op med at virke, så kan man prøve at udskifte sikringen. Der indgår et par ekstra reservesikringer ved levering.

KØRSEL AF DIN BLIMO

Begynd med at blive godt kendt med betjeningspanelet og kontrollen af din Blimo. Forneden finder du en redegørelse over hvilken funktion de forskellige kontrolknapper



1. Gashåndtag
2. Frem- og tilbageknap
3. Batteriindikator
4. Fæstne til kørekort

For at starte din scooter op skal du til at begynde med dreje på tændingslåsen som sidder placeret på midten under din stol. Når du drejer på tændingslåsen så kan du se på batteriindikatoren at lamperne lyser op.

For at begynde at køre, holder du gashåndtaget inde. Gassen er trinløs, så jo mere du holder den inde, desto hurtigere bevæger din Blimo Caddie sig. Hvis du i stedet ønsker at bakke med din Golscooter, trykker du den røde knap over gashåndtaget ind.

På styret kan du også se din batteriindikator. Når batteriet er fuldt lyser alle lamperne. Når den grønne lampe slukker, har du ca. 60% batteri tilbage, og når den gule lampe slukker, har du ca. 30% tilbage. Så er det tid til at oplade promenadescooteren igen. Oplad gerne din promenadescooter efter hver køretur.

VEDLIGEHOELDELSE

I modsætning til forbrændingsmotorer kræver en elmotor ingen regelmæssig service. Der er dog et par få punkter vi anbefaler at du regelmæssigt går igennem for at sikre dig at køretøjet virker.

RENGØRING

Rengør køretøjet og sædet regelmæssigt med en fugtig klud. Undgå at sprøjte vand direkte på køretøjet da det kan trænge ind i elektronikken.

LANGTIDSOPBEVARING

Hvis du ikke skal bruge din Blimo i en længere periode så at det vigtigt at huske på:

- 1) At opbevare køretøjet i et tørt miljø.
- 2) At opbevare køretøjet i plusgrader, ellers kan batterierne fryse til.
- 3) At oplade køretøjet med 30 dages mellemrum.

Det er også fint at fjerne batterierne fra køretøjet under langtidsopbevaring. Husk at tilslutte opladeren med 30 dages mellemrum. Det er også fint at bruge en oplader til bilbatterier og oplade batterierne individuelt.

VEJLEDNING FOR UDSKIFTNING AF DÆK OG SLANGE

Din Blimo er udstyret med kraftige gummidæk samt udskiftelige slanger. Det kan ske at slangen punkterer eller at dækkene opslides. Det er vigtigt at du skaffer de rigtige originaldele for at få de der passer til, kontakt Blimo Hjælpemiddel for at bestille reservedele. Et almindeligt cykel- eller knallertværksted kan bruges hvis du behøver hjælp.

Tag hjulet af

Stil gerne køretøjet på en palle eller lignende så det punkteret hjul ikke står direkte på jorden. I hjulets centrum er der et dæksel som sidder fast med to små skruer. Skrue skruerne ud og tag det af. Nu ses hjulmøtrikkerne som holder hjulet fast på akslen. Løsne på den centrale møtrik som holder hjulet fast mod hjulakslen, brug gerne en stiknøgle som griber hele vejen rundt om møtrikken. Derefter er hjulet løst og kan løftes af hjulakslen.

Tag dæk og slange af

- 1) Tag eventuel luften ud af slangen. Der må ikke være noget tryk tilbage når du tager dækket af.
- 2) Tager alle fire møtrikker af på hjulfælgen.
- 3) Træk fælgen lige udad så fælgen deles i to dele.
- 4) Tag dæk og slange af.

Monter dæk og slange

- 1) Træk slangens ventil igennem hjulfælgen.
- 2) Pump en anelse luft i slangen igen for at sikre dig at den ikke folder indeni dækket.
- 3) Placer slangen i dækket. Sørg for at trykke slangen ordentlig ind i dækket.
- 4) Samle de to hjulfælge dele med hinanden.
- 5) Spænd de fire møtrikker fast igen.
- 6) Pump dækket helt med et dæktryk på (3,0 bar)

BEMÆRK: Efter at hvis du har løsnet hjulet fra køretøjet eller har skiftet slange/dæk, så er det vigtigt at du efterspænder alle møtrikker efter noget tids brug!

DÆKTRYK

Tjek at du har det korrekte dæktryk 2,07 BAR (svare til 30 PSI) inden du begynder at bruge din promenadescooter. Hvis der er for lavt dæktryk så kan du pumpe dækkene på en benzintank. Hvis du ønsker en håndpumpe hjemme, så kan du finde en der passer hos nærmeste cykelbutik.

Hav for vane at tjekke dæktrykket med jævne mellemrum, cirka en gang om måneden, da et lavt dæktryk medfører væsentlig forkortet rækkevidde.

HJULINDSTILLING

Hvis du har kørt på ujævnt underlag eller hvis du for nylig har udskiftet hjul på din Blimo, så kan det være en god ide at gennemgå hjulindstillingerne. Hvis dine hjul er justeret forkert, kan det påvirke din rækkevidde meget negativt, samt du kan få ujævne nedslidninger på dine dæk.

For at indstille dit styreled, løsner du på begge leddets møtrikker. Når disse er løse, indstiller du selve midt leddet ved hjælp af værktøj. Leddet har et hak for at det værktøj du bruger kan få ordentlig fat. Juster og spænd møtrikkerne efter igen.


FORSIKRING OG STELNUMMER

Din Blimo kræver ingen trafikforsikring for at kunne fremføres. Hvis du ønsker at forsikre køretøjet mod tyveri og skade, kontakter du dit forsikringselskab og meddeler at du vil forsikre en elektrisk rullestol.

Når du er i kontakt med dit forsikringselskab omkring din BLIMO vil de spørge efter køretøjets stelnummer. Dette nummer er på siden af papkassen som din BLIMO bliver leveret i. Sørg for at tilføje dette nummer bagerst i brugsanvisningen.



TEKNISK INFORMATION

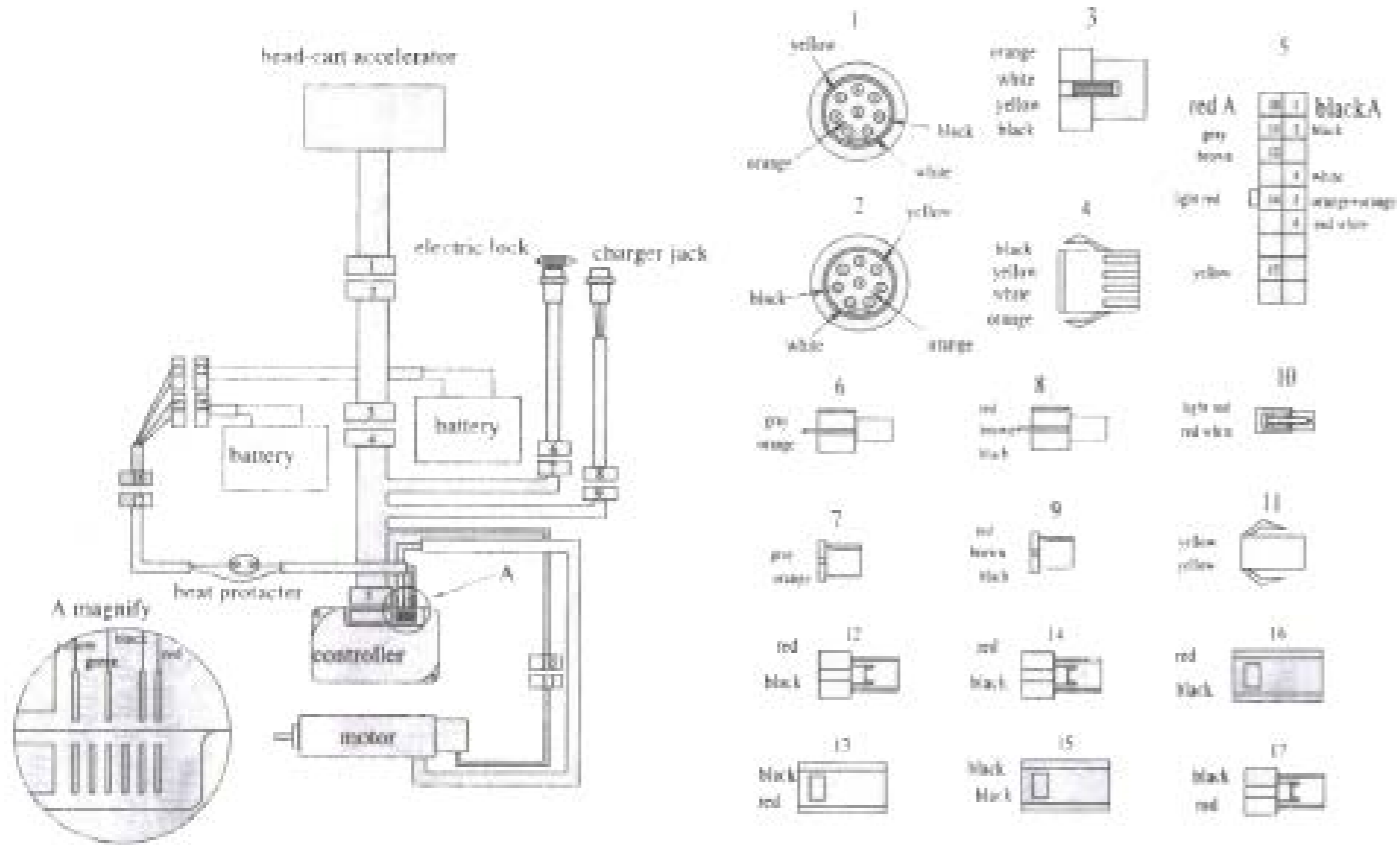

FEJLSØGNING

FEJL	INDIKATION	LØSNING
Din Blimo Caddie kan ikke starte.	1. Du har ikke drejet nøglen om til den rigtige position. 2. Dine batterier er ikke korrekt tilsluttet.	1. Drej nøglen med uret i tændingslåsen. 2. Tjek dine batterikabler.
Din Blimo Caddie har en kort rækkevidde.	1. Dine batterier er ikke opladet tilstrækkeligt. 2. Du har for lavt dæktryk. 3. Du har forkert hjulindstilling. 4. Dine batterier er døde eller beskadiget.	1. Oplad dine batterier indtil opladerens diode slår om til grøn. 2. Pump dækkene til 30 PSI. 3. Juster hjulindstillingerne som vist i brugsanvisningen. 4. Mål dine batterier efter de er fuldt opladet med et voltmeter. Sunde batterier med 12V giver ca. 13V.
Din Blimo Caddie kører for langsomt.	1. Dine batterier er ikke godt nok opladet. 2. Du har lavt dæktryk. 3. Du har forkert hjulindstilling.	1. Oplad dine batterier indtil opladerens diode slår om til grøn. 2. Pump dæk til 30 PSI. 3. Juster hjulindstillingerne som vist i brugsanvisningen.
Din Blimo Caddie standser pludseligt under kørsel.	1. Dine batterier er ikke opladet godt nok.	1. Oplad dine batterier indtil opladerens diode slår om til grøn.

KONTAKTOPLYSNINGER

Adresse:

BLIMO.se

Nordbutiker i Sverige AB

Gösvägen 28

761 41 Norrtälje

Sverige

Virksomhedsoplysninger:

Nordbutiker Danmark

Filial af Nordbutiker i Sverige

AB, Sverige

CVR.nr: 38385739

Telefon/E-mail:

Telefon: +45 89 87 30 84

E-mail: info@blimo.dk

Hemsida: www.blimo.dk

STELNUMMER

--	--	--	--	--	--	--

Modell

--